

ANVÄNDARMANUAL

EASYLIFT SHOULDER



Tillverkare:

AB Germa

Industrigatan 54-56

SE-291 36 Kristianstad

Sweden

Tel: +46 (0)44 12 30 30

Fax: +46 (0)44 10 31 79

E-mail: info@germa.se

www.germa.se

Distribution:  **FERNO**

CE

ANVÄNDARMANUAL EASYLIFT SHOULDER

Easy Lift är ett hjälpmedel som är utvecklat för framför allt avlasta händer och armar vid tyngre lyft. Fördelen är att avlasta fysiska ansträngningen för användaren samt att vid snabbt uppkommit behov kunna släppa handtaget precis som vid lyft utan EasyLift. Var noggrann med att följa instruktionen för säker avlastning av tyngre lyft och/eller vid lyft över längre avstånd.



1) Ta på selen med spännena på framsidan.



2) Se till att krysset på ryggen ligger korrekt placerat, se bild.



3) Placera långfingret i fickan längst ner på remmen, görs på respektive sida. Justera sedan längden så att Du har lätt böjda armar.



4) Fatta handtaget på baren något längre in än normalt. Styr positionen av remmen med långfingret i fickan.



5) När Du knyter handen runt handtaget kommer eventuellt fingret att glida ur fickan, detta är normalt då fickan är till för att initialt styra remmen i rätt läge. Klar att lyfta, räta på armarna och se till nyttja remmarna för lyftet. Avlastar händer och armar.



6) EasyLift kan bäras för att snabbt kunna plockas fram. På remmarna längst ner finns ett kardborre fäste påsytt, viker Du upp remmen och fäster den kan Du ha EasyLift på Dig under västen/jackan utan att den syns eller är i vägen. Om Du får för mycket rem över, trä med fördel in den i karbinen så är den inte i vägen för annat arbete.

Art no: 150 000 000 06
Art: Easylift Shoulder

Distribution:  **FERNO**

Address
Box 2127
SE-291 02 Kristianstad
SWEDEN
info@germa.se
www.germa.se

Street
Industrigatan 54-56

Phone
+46(0)44123030

Telefax
+46(0)44103179

Organisation number
556086-9413